


# QuickSleeper® 5

КРАТКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

ВАЖНО : прочитать перед первым применением

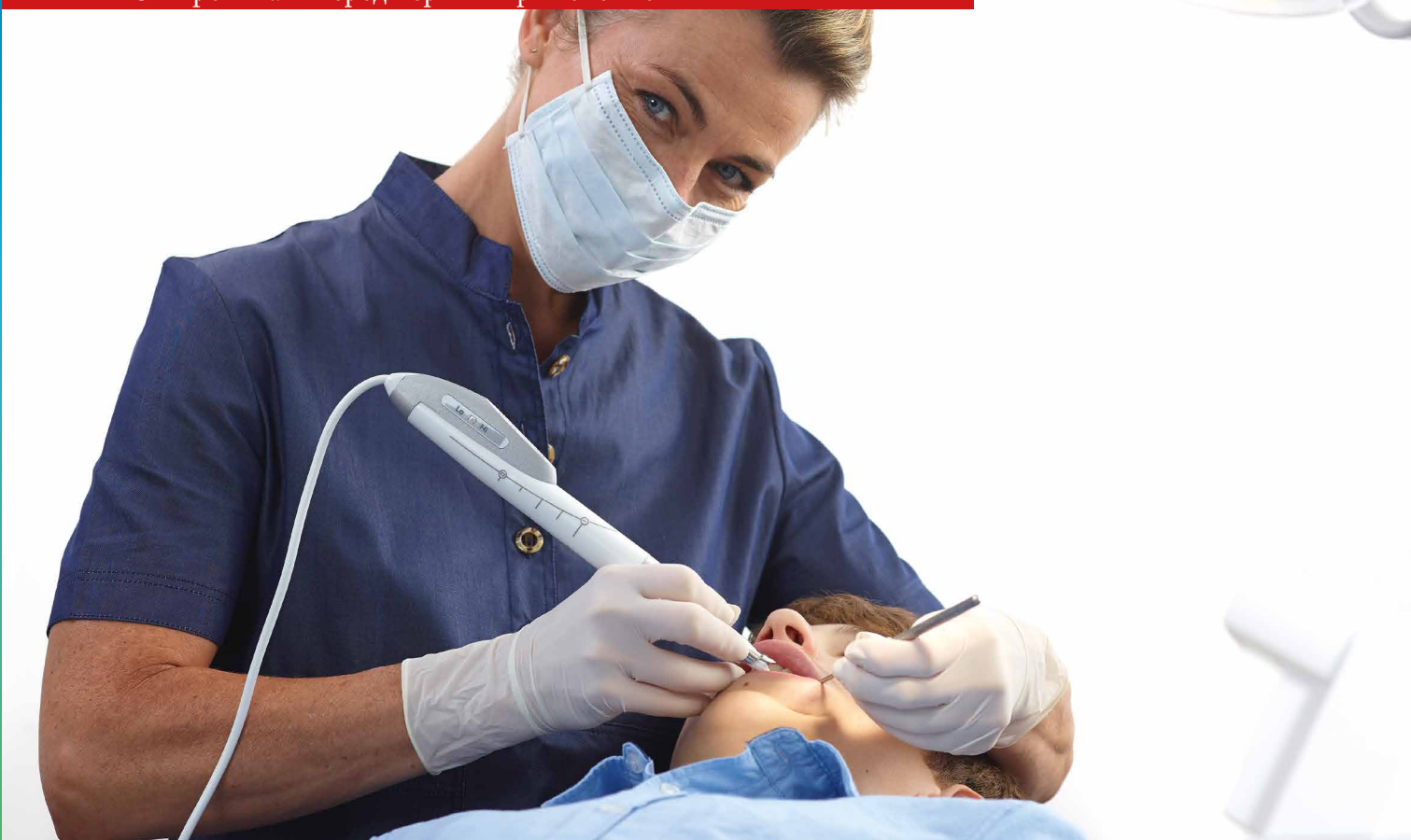

Version QS520210106-UK



**Dentahitec**

Les stylos d'anesthésie  
qui changent la vie

---

## СОДЕРЖАНИЕ

ВНУТРИКОСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ \_\_\_\_\_ 4 - 5

ПРОТОКОЛ \_\_\_\_\_ 6

ПРАКТИКА \_\_\_\_\_ 7

УЧЕБНЫЙ СИМУЛЯТОР \_\_\_\_\_ 8 - 9


ВАША 1<sup>я</sup> АНЕСТЕЗИЯ С БОБОМ \_\_\_\_\_ 10-13

## ВНУТРИКОСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ

#### ОСТЕОЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЛИ ТРАНСКОРТИКАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ ?

Сохранена межзубная перегородка ?

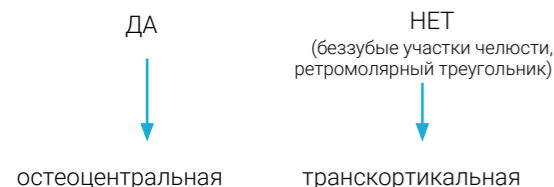

### ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Остеоцентральная и транскортикальная виды анестезии представляют собой введение анестетика непосредственно в губчатую кость. **Количество обезболенных зубов, а также продолжительность и эффективность** анестезии зависят от трех факторов:

- МЕСТО:** чем больше объем костной ткани в месте введения анестетика (дистальные отделы), тем больше анестетика нужно
- АНЕСТЕТИК:** чем выше концентрация вазоконстриктора, тем выше эффективность и продолжительность анестезии.
- КОЛИЧЕСТВО:** количество введенного анестетика должно быть соизмеримо с объемом губчатой кости, количеством зубов, которые нужно обезболить и необходимой продолжительностью процедуры.

Принимая во внимание перечисленные выше факторы, возможно обезболить от 2 до 8 зубов при помощи одной полной карпулы анестетика, введенной в определенное место, с продолжительностью действия анестезии **от 45 до 75 минут.**

### ПОКАЗАНИЯ

- **Пациенты: взрослые и дети.**
- Применение: все виды лечения, удаления. Рекомендовано для зубов с пульпитом.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- Доступ к третьему моляру верхней челюсти - в этом случае рекомендована инфильтрационная анестезия.
- Инфицированная кость или узкий межзубный промежуток - рекомендовано выполнить внутрикостную анестезию дистальнее от пораженной зоны или выбрать другую методику.
- Специфические клинические ситуации (пародонтопатия, периапикальная инфекция, ...)
- Используйте только иглы DHT, созданные для работы с QuickSleeper.

### АНЕСТЕТИК

**Для повышения эффективности и для снижения системной токсичности анестетика рекомендовано использовать вазоконстриктор.**

**Придерживайтесь рекомендаций производителя относительно количества анестетика допустимого для введения за один прием. Убедитесь, что у пациентов нет противопоказаний к вазоконстрикторам (аритмия, прием некоторых препаратов и т.д.).**



## ВНУТРИКОСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

### ДИФфуЗИЯ АНЕСТЕТИКА

**Верхняя челюсть:** распределение анестетика мезиально и дистально от места введения. Выбирайте для введения точку с наилучшим доступом.

**Нижняя челюсть:** распределение анестетика происходит в основном мезиально. Выбирайте для введения точку дистальнее от зуба, с которым работаете, особенно при работе с депульпированными зубами и воспаленными тканями. Для бессимптомного зуба, мезиально выполненная остеоцентральная инъекция так же обеспечит достаточное местное обезболивание для зуба, находящегося дистальнее от места инъекции.

Пример диффузии:

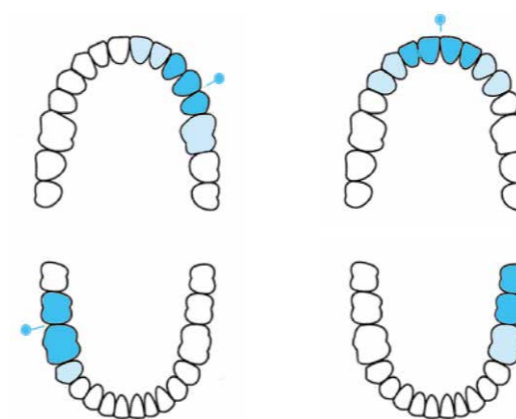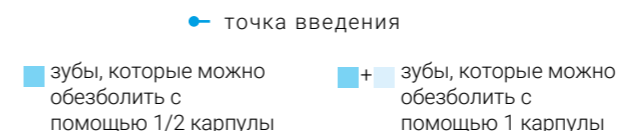

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

Обезболивающий эффект появляется немедленно и дополнительной небной или язычной анестезии не требуется, даже для простых удалений. Не нужны множественные инъекции и для установки раббердама.

### БЕЗБОЛЕЗНЕННО

Кортикальная и губчатая кость не иннервированы, поэтому остеоцентральное и транскортикальное введение - полностью безболезненно. Вы можете сообщить пациенту, что он услышит шум и почувствует мягкую вибрацию, но не почувствует боли.

## ПРОТОКОЛ


Остеоцентральная и транскортикальная анестезия выполняются в три шага: выполнение osteoцентральной и транскортикальной анестезии отличаются на шаге 2.



## ПРАКТИКА

СДЕЛАЙТЕ ПЕРВУЮ ВНУТРИКОСТНУЮ ИНЪЕКЦИЮ БОБУ.

*“Боб” - это учебная модель, которая поможет вам отработать правильную технику выполнения внутрикостной анестезии аппаратом QuickSleeper.*

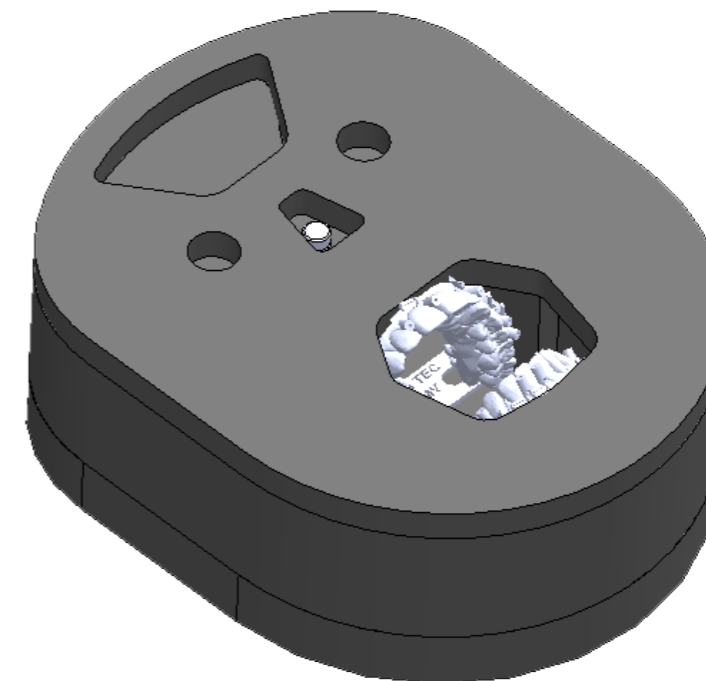

## УЧЕБНЫЙ СИМУЛЯТОР

“Боб” - это учебный симулятор, который помогает смоделировать вашу первую внутрикостную анестезию с аппаратом QuickSleeper.


У него съемные челюсти и специальные выемки для лучшего обзора положения иглы относительно корней зубов.




С Бобом вы освоите:

- положение относительно пациента
- точки опоры
- угол наклона наконечника
- ощущение при перфорации
- глубина введения иглы
- извлечение иглы

выемки для лучшего обзора

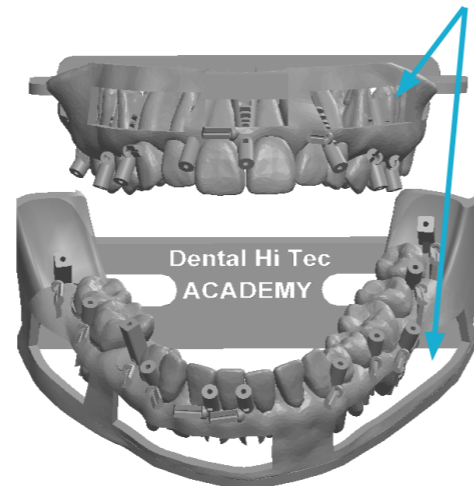


Симулятор оснащен ремнем для удобной фиксации на стоматологическое кресло

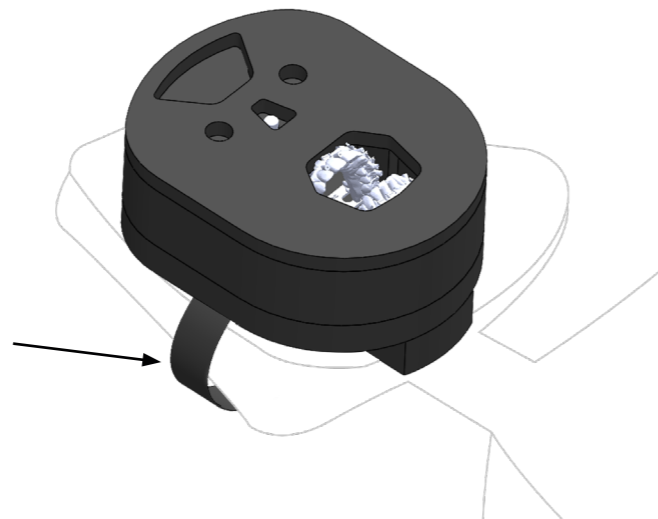

## УЧЕБНЫЙ СИМУЛЯТОР

При тренировках на симуляторе используйте только пустую карпулу, поставляемую вместе с Бобом, чтобы предотвратить переход QuickSleeper в безопасный режим при перфорации (остановка вращения). Данный режим активируется при работе с полной карпулой, так как челюсти сделаны из полимера, который блокирует поток анестетика в игле.

Пустая карпула

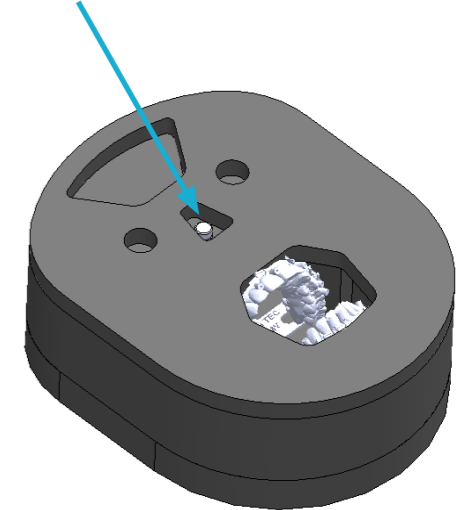


На челюсти три типа направляющих для введения иглы:

- прикрепленная десна (полутрубка)
- остеоцентральная (круглые)
- транскортикальная (квадратные)

Транскортикальная анестезия


Остеоцентральная анестезия

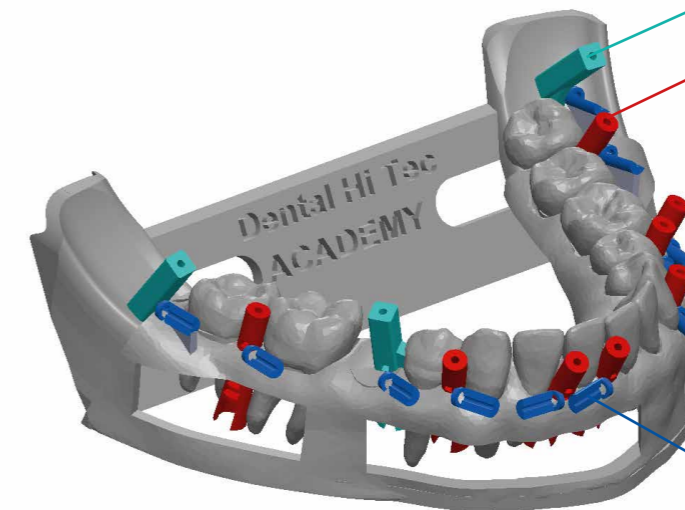

Анестезия прикрепленной десны

## ВАША 1<sup>я</sup> АНЕСТЕЗИЯ С БОБОМ

В зависимости от типа анестезии зафиксируйте иглу нужного размера на QuickSleeper.

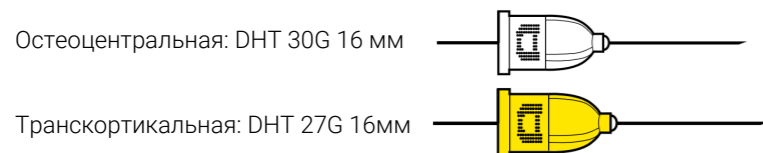


## МАЛЕНЬКОЕ МЕЖЗУБНОЕ РАССТОЯНИЕ?

Измените точку введения следующим образом:

- Зубы верхней челюсти (например, между зубами 12 и 13, 15 и 16, 26 и 27 или 21 и 22): выберите мезиальную или дистальную точку инъекции и увеличьте вводимое количество анестетика, чтобы компенсировать расстояние до целевого участка.
- Зубы нижней челюсти (например, между зубами 31 и 32, 42 и 43 или 36 и 37): выберите точку инъекции дистальнее от зуба, увеличьте вводимое количество анестетика, чтобы компенсировать большее расстояние до целевого участка. В случае зуба 36 при наличии достаточного межкорневого пространства можно выполнить межкорневую инъекцию. Данный вид инъекции требует определенного опыта.

## ВАША 1<sup>я</sup> АНЕСТЕЗИЯ С БОБОМ

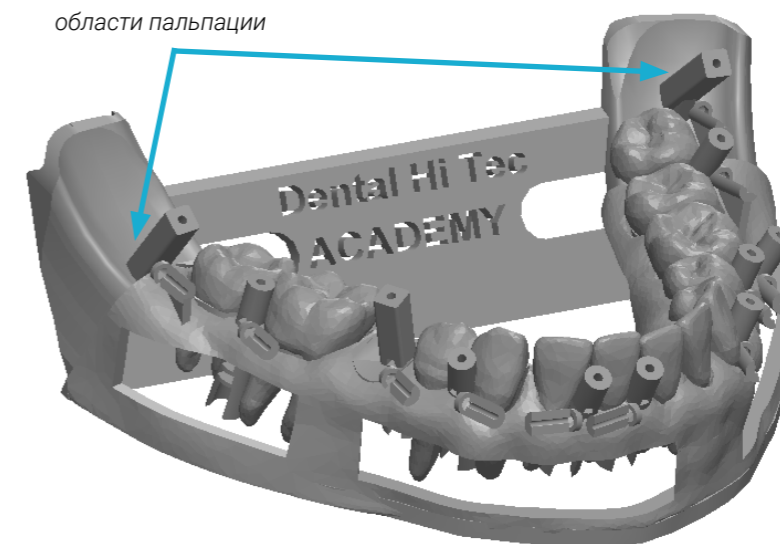

## ИНЪЕКЦИЯ В ОБЛАСТЬ РЕТРОМОЛЯРНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА

На модели десна в области ретромолярного треугольника частично удалена для лучшей визуализации анатомической бороздки в которой рекомендуется выполнять перфорацию (наиболее тонкий участок кортикальной пластинки).

Рекомендуется сначала пропальпировать эту область пальцем в полости рта, чтобы полностью понять анатомию и найти место перфорации.



## ДЛЯ БЕЗБОЛЕЗНЕННОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИКРЕПЛЕННОЙ ДЕСНЫ:

- Выберите стабильные точки опоры
- Убедитесь, что индикатор среза иглы правильно ориентирован
- Угол введения иглы почти параллелен десне
- Уменьшите глубину введения иглы, чтобы оставаться в поверхностных тканях
- Будьте аккуратны



## ДЛЯ УСПЕШНОЙ ОСТЕОЦЕНТРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ:

- Задействуйте вторую руку, чтобы контролировать положение головы пациента.
- Выберите стабильные точки опоры
- Введите иглу до контакта с межзубной перегородкой
- Введите иглу между корнями
- Направляйте, но не давите на иглу во время вращения
- Введите иглу на 3/4 длины
- Извлеките иглу без вращения



## ДЛЯ УСПЕШНОЙ ТРАНСКОРТИКАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ:

- Задействуйте вторую руку, чтобы контролировать положение головы пациента.
- Выберите стабильные точки опоры
- Введите иглу до контакта с костью в точке самого простого доступа рядом с зубами, которые необходимо обезболить
- Убедитесь, что положение иглы перпендикулярно кортикальной костной пластине.
- Остановите введение иглы как только пройдете кортикальную кость
- Извлеките иглу без вращения



## ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИИ:

Не давите на иглу во время перфорации, это может привести к закупорке иглы и причинить боль пациенту. Просто направляйте иглу по мере ее продвижения. Ниже приведено идеальное количество циклов вращения в разных областях при проведении анестезии на симуляторе Бобе (это количество может меняться в зависимости от пациента):

транскортикальная		остеоцентральная	
Треугольник	45	верхняя челюсть	Mandibular teeth
5 - 6 циклов вращения	3 цикла вращения	5 - 6 циклов вращения	7 - 8 циклов вращения
 Игла DHT® желтая канюля: 27G – 16 мм		 Игла DHT® белая канюля : 30G – 16 мм	



Движения вперед-назад, показанные в видеороликах, дополнительно снижают риск закупорки иглы.

# QuickSleeper® 5



Санкт-Петербург ул.Седова 11к2  
zakaz@vilanadent.ru  
8(812)336-60-16  
8(981)779-13-80  
vilanadent.ru



## Dentalhitec

Les stylos d'anesthésie  
qui changent la vie

ZI de l'Appentière · 49280 Mazières-en-Mauges · FRANCE

mail@dentalhitec.com

[www.dentalhitec.com](http://www.dentalhitec.com)